

## ANVÄNDARGUIDE

### WIDEX SOUNDCONNECT

Denna korta guide ger dig snabbt den viktigaste informationen om Widex SoundConnect.

#### Vad är Widex SoundConnect?

Widex SoundConnect är en diskret, snygg USB-dongle som kan användas för att strömma ljud direkt från en persondator (PC) till en användares kompatibla Widex-hörapparater.

#### Med vilka program kan Widex SoundConnect användas?

Widex SoundConnect kan användas för att strömma ljud från alla program med ljudutgång, till exempel: Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet och andra musik-/ mediaspelare.

#### Teknisk information

<b>Anslutningstyp</b>	USB-A "standard" -kontakt
<b>Kompatibilitet med hörselapparater</b>	Widex Moment modeller med Bluetoothfunktion
<b>Appkompatibilitet</b>	Widex Moment app
<b>PC-inställning</b>	Plug-and-play*
<b>Räckvidd</b>	8 meter inomhus, 5 meter utomhus

\*I sällsynta fall, där flera ljudutgångsenheter är anslutna till datorn, kan det vara nödvändigt att aktivt välja Widex SoundConnect som ljudutgångsenhet.



#### Så här kopplar du ihop Widex SoundConnect med hörapparaterna

1. Sätt in Widex SoundConnect i datorns USB-port.
2. Starta om hörapparaterna för att aktivera parningsläge i tre minuter.
3. Tryck och håll ned knappen på sidan av dongeln tills ljuset blinkar blått.  
  
Se till att hörapparaterna och Widex SoundConnect är inom 1,5 meter från varandra.
4. Ljusindikatorn blir fast grönt (svagt) när parningen är klar.

#### Ljusindikatorer

Betydelseerna av de olika färgerna på LED-ljusindikatorn är:

<b>Blinkande vitt</b>	Inte ihopkopplad med hörapparater
<b>Blinkande blå</b>	Parningsläge
<b>Blinkande grönt</b>	Söker efter tidigare parade hörapparater
<b>Fast grönt (svagt)</b>	SoundConnect är ansluten till hörapparaterna men strömmar ej ljud
<b>Fast grönt (intensivt)</b>	SoundConnect är ansluten till hörapparaterna och strömmar ljud
<b>Fast orange</b>	Service läge (se felsökning i bruksanvisning)
<b>Blinkande rött</b>	Felläge (se felsökning i bruksanvisning)


## SOUNDCONNECT I MOMENT APPEN

**Delad "plats"**  
SoundConnect och SoundAssist använder samma "minnesplats" i hörapparaterna.

**Återställ**  
Återställ justerat ljud till ursprunglig inställning.

**Volym/dämpa**  
Justera kombinerad volym eller dämpa hörapparaternas mikrofoner.

**Inställningar**  
Justera ljudinställningarna för strömmat ljud.

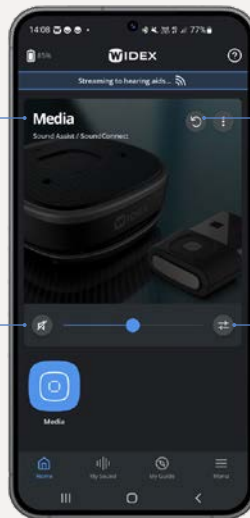


**Ljudmixer**  
Justera balans mellan strömmat ljud och omgivningsljud.



**Separat volymkontroll**  
Justera det strömmade ljudet separat för höger och vänster.




**Equaliser**  
Justera balansen mellan bas, mellan och höga frekvenser för det strömmade ljudet.

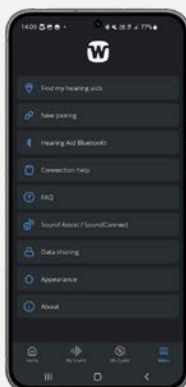

**Support**  
Mer information finns tillgängligt under "SoundAssist/ SoundConnect".



**Enhetsinformation**  
Se detaljerad information som enhets/program version.

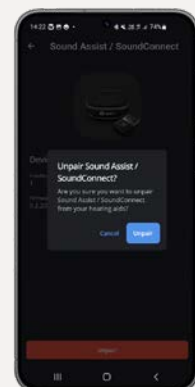

**Ta bort parning**  
Ta bort parning mellan SoundConnect och hörapparaterna (när ljud ej streamas).