

LYCKA TILL MED DITT NYA DEX HJÄLPMEDEL

Innan du kan börja använda din nya TV-DEX eller RC-DEX, skall dom matchas till dina WIDEX hörapparater. Detta gör du enkelt genom att använda följande procedur:



RC-DEX

1. Sätt i batterier i din RC-DEX fjärrkontroll
2. Öppna och stäng batteriluckan på dina hörapparater. Du har nu 2 minuter på dig att matcha ihop RC-DEX med dina hörapparater.
3. Sätt på dig dina hörapparater. Håll RC-DEX fjärrkontrollen i höjd med hakan. Tryck samtidigt in de två volymknappar +/- på RC-DEX och håll dom inne i minst 5 sekunder. När du hör en ljudsignal i hörapparaterna är RC-DEX fjärrkontrollen matchad och fungerar tillsammans med dina hörapparater.



TV-DEX

1. Ladda din TV-DEX kontroll i basstationen i minst 15 minuter.
2. Öppna och stäng batteriluckan på dina hörapparater. Du har nu 2 minuter på dig att matcha ihop TV-DEX med dina hörapparater.
3. Sätt på dig dina hörapparater. Håll TV-DEX kontrollen i höjd med hakan. Tryck samtidigt in de två volymknappar +/- på kontrollen och håll dom inne i minst 5 sekunder. När du hör en ljudsignal i hörapparaterna är TV-DEX kontrollen matchad och fungerar tillsammans med dina hörapparater.

OBS! Med en digital-TV, måste man köpa en optisk AD-omvandlare.