



TONELINK™-APPEN  
**SNABBGUIDE**

**WIDEX**®

HIGH DEFINITION HEARING



# KOMMA IGÅNG

TONELINK™-appen är utformad för att fungera med alla nyare Widex-hörapparater och kan ansluta till iPhone- och Android-telefoner.

Ladda ned TONELINK™-appen från App Store eller Google Play.

# SÅ FUNKERAR DEN

Appen TONELINK™ använder din telefons högtalare för att skicka instruktioner till dina hörapparater med hjälp av högfrekventa ljud.


Du måste parkoppla hörapparaterna med din telefon första gången du använder appen. Följ dessa steg och tänk på att du kanske måste justera telefonens volym under processen.

# PARKOPPLA TONELINK™ MED DIN TELEFON

1. Öppna appen TONELINK™ och följ instruktionerna på skärmen
2. Hitta och skanna QR-koden i bruksanvisningen till din hörapparat, om du fått en sådan av din audionom. Om inte, trycker du på **Hoppa över**
3. Starta om hörapparaterna genom att stänga av och på dem för att sedan sätta på dem igen
4. Parkoppla dina hörapparater med din telefon genom att trycka på **Parkoppla**
5. Om du hör ett ljud i hörapparaterna trycker du på **Ja**
6. Om du inte hör något ljud i hörapparaterna trycker du på **Nej**. Justera sedan volymen på din telefon och tryck på **Parkoppla** igen

TONELINK™-appen hjälper dig att växla mellan program. Genom att skanna QR-koden från hörapparaternas bruksanvisning kan appen visa de program som är specifikt utvalda för dig.

# TONELINK™- APPEN STARTSKÄRM

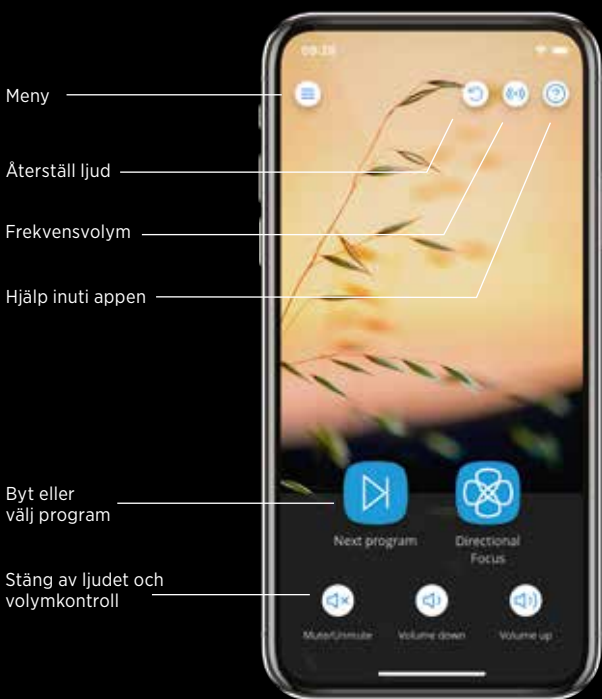



# ENKEL AVÄNDNING

Med TONELINK™ kan du enkelt:

- Byta program
- Justera volymen
- Stänga av ljudet
- Ändra riktningsfokus

## **MER INFORMATION**

[www.widex.se/tonelink](http://www.widex.se/tonelink)

## **ÄR DIN TELEFON KOMPATIBEL?**

[www.widex.se/apps](http://www.widex.se/apps)

## **VILL DU HA TIPS ELLER VETA MER OM HÖRSEL OCH HÖRSELNEDSÄTTNING?**

[www.widex.se/nyhetsbrev](http://www.widex.se/nyhetsbrev)

## **INFORMATION OM HUR DU UNDERHÅLLER DINA HÖRAPPARATER**

[www.widex.se/underhåll](http://www.widex.se/underhåll)



Tryckt 2020-01. 9 502 5402 012 #01

Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ och DEX är varumärken som tillhör Widex A/S.



WIDEX A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.